

બોવઈઝીથી આવી, ખેડૂતોની ખુશહાલી

28 દિવસમાં ગાભણની ખુશખબરી

સચોટ • અસરકારક • પશુ માટે પીડારહિત

વહેલી
ગાભણ તપાસ,
₹ 10,000/-
સુધીની
બચત
પ્રતિ વેતર

ફક્ત ગાય અને ભેંસ માટે



ગાયના બીજદાનના
28 દિવસ બાદ તપાસ કરવી



ભેંસના બીજદાનના
35 દિવસ બાદ તપાસ કરવી



* ધારણાના ખર્ચ પર આધારિત



અમારા સર્વે અનુસાર,
અનેક પશુઓ,
બીજાદાન પછી ખાલી
નીકળે છે. અને આ
વાતની જાણકારી ખેડૂતને
60 દિવસ પછી મળે છે.

60 દિવસ પછી, જાણકારી મળવાના કારણે,

- ખેડૂત સમયસર પશુના ગાભણની સમસ્યાઓનો નિકાલ નથી લાવી શકતા.
- તેમની 2 મહિનાની ચાકરી વ્યર્થ જાય છે.
- પશુને આપેલ ચારાનો ખર્ચ જે આશરે ₹10,000/- પ્રતિમાસ છે, તે વ્યર્થ જાય છે.
- ખેડૂતની આશા નિષ્ફળ નીવડે છે.
- હાથથી તપાસ કરવાથી ગર્ભપાત થવાની શક્યતા રહે છે.
- બે વિચારણા વચ્ચેનો સમયગાળો વધી શકે છે.

ત્રણ સરળ સ્ટેપમાં તપાસ



તપાસ માટે લોહી લેવું

બીજાદાન બાદ ગાય હોય તો 28 અને ભેંસ હોય તો 35 દિવસ પછી ગરદન, પૂંછડી અથવા કાનની નસ માંથી લોહી લો.



પટ્ટી પર લોહી ઉમેરો

એકત્રિત કરેલ લોહીના ત્રણ ટીપાં ડ્રોપરની મદદથી પટ્ટી પરના વર્તુળાકાર ભાગ પર મુકો.



પટ્ટી પર લિક્વિડ ઉમેરો

લોહીના ટીપાં બાદ, આપેલ લિક્વિડ, પટ્ટીના વર્તુળાકાર ભાગમાં ઉમેરો અને 20 મિનીટ બાદ પરિણામ જુઓ. પરિણામ ટેબાયાના 10 મિનીટની અંદર જ પરિણામ જોવું જરૂરી છે.

પરિણામ જોવાની રીત:

20 મિનીટમાં તપાસનું પરિણામ જાણો


તપાસ કીટમાં ત્રણ રેખાઓ હોય છે, જેમાં C નિયંત્રણ રેખા, B આધાર રેખા અને T પરીક્ષણ રેખા છે. પરીક્ષણ રેખા T, વચ્ચેની આધાર રેખા B કરતા, વધુ ઘટ્ટ લાલ/ગુલાબી જણાય તો, તે પશુ ગાભણ હોવાનું સાબિત કરે છે.



ગાભણ



શંકાસ્પદ

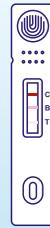

ગાભણ નથી



અમાન્ય



પ્રોમ્પ્ટ ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લીમિટેડ

7મો માળ, શાંતિવાન કોર્પોરેશન, સી.જે. માર્ગ, ઈન્ડિયન-આઈલી રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત - 380 058
www.promptdairytech.com | info@promptdairytech.com | ફોનો કરો

વધુ જાણકારી માટે સંપર્ક કરો: +91 75730 01132

બોવઇડીની
પ્રક્રિયાનો વિડીયો



30 prompt
વધોથી શુદ્ધતા
અને ઈનોવેશનનો
વિશ્વાસ

Sep-2025