

prompt[®]
The pursuit of purity

लक्षण दिखने से पहले
मास्टाइटिस की पहचान,
सही इलाज

prompt
BOVEASY

california mastitis test kit

इस्तेमाल में आसान • तेज़ • भरोसेमंद



CMT

बिना लैब, बिना इंतज़ार-20 सेकंड में सब-क्लिनिकल मास्टाइटिस की तुरंत पहचान

सब-क्लिनिकल
मस्टाइटिस से भारतीय
डेरी किसानों को
हर साल लगभग हज़ारों
करोड़ रुपये का
नुकसान होता है।

देर से पता चलने की वजह से:

दूध उत्पादन में 15-30% तक की गिरावट

इलाज के लिए प्रति पशु ₹2,000-₹4,000
का अतिरिक्त खर्च

बार-बार संक्रमण, जिससे पशु की उत्पादकता
में स्थायी रूप से घटाव

कुल मिलाकर किसान की आय में सीधी कमी

4 स्टेप्स में मस्टाइटिस की जांच

स्टेप 1



पशु के हर एक थन से 4 कप
पैडल में 3ml दूध लें

स्टेप 2



किट में दिए गए डिस्पेंसर में
3ml CMT रीजेंट लें

स्टेप 3




4 कप पैडल में 3ml CMT
रीजेंट डालें

स्टेप 4




पैडल को 10-15 सेकंड्स
तक घुमाते हुए मिलाएं


परिणाम समझें

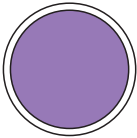

संक्रमण नहीं है
मस्टाइटिस नहीं है
सोमेटिक सेल की संख्या:
0-200,000 cells/ml
दिखाव: दूध में कोई बदलाव नहीं
(जैल नहीं बनता)

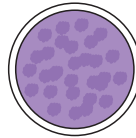

संक्रमित
मस्टाइटिस मौजूद है
सोमेटिक सेल की संख्या:
150,000-5 million cells/ml
दिखाव: हल्का गाढ़ापन
(तरल जैल बनता है)

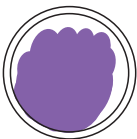

संक्रमित
क्लिनिकल मस्टाइटिस है
सोमेटिक सेल की संख्या:
5 million cells/ml से अधिक
दिखाव: अधिक गाढ़ापन
(चिपचिपा जैल बनता है)

ध्यान दें:

यह परिणाम आंखों से देखकर तुरंत समझा जाता है,
किसी मशीन या लैब की ज़रूरत नहीं है।

एक बार इस्तेमाल करने के बाद, पैडल अच्छी तरह
साफ करें ताकि दूसरे पशु में संक्रमण फैलने से रोका
जा सके।

प्रॉम्प्ट इक्वीपमेन्ट प्रा. लि.

7 वी मंजिल, शालीग्राम कोर्पोरेट्स, डिशमेन हाउस के पीछे, सी. जे. मार्ग,

इस्कोन - आंबली रोड, अहमदाबाद, गुजरात - 380058, भारत।

www.promptdairytech.com | info@promptdairytech.com

Ph: 75730 01132 | Follow us on

30 prompt
सालों से शुद्धता
और इनोवेशन
का भरोसा